

Chronische Wunden (Ulcus cruris, Dekubitus)

URGO HYDROGEL

- 💧 Befeuchtung trockener chronischer Wunden und nekrotischer Hautstellen
- 💧 Hohe Feuchtigkeitskapazität
- 💧 Begünstigung der Selbstreinigung
- 💧 Tragedauer bis zu 4 Tage

Inhalt	Stück	PZN	Art.-Nr.
15 g/Tube	10	030 001 5	504102
15 g/Tube	5	201 343 2	591665
15 g/Tube	5	191 644 5	514102
mit 5 Applikatoren			

URGO GmbH - Justus-von-Liebig-Straße 16 - 66280 Sulzbach - www.urgo.de

The logo for URGO MEDICAL, featuring a stylized 'U' icon to the left of the text 'URGO' in a bold, sans-serif font, with 'MEDICAL' in a smaller font below it.

Art.-Nr. 010718 - Rev.04.2016.12

URGO HYDROGEL

Zur Befeuchtung trockener
chronischer Wunden und
nekrotischer Hautstellen




Urgo Hydrogel ist ein steriles, klares Feuchtigkeitsgel zur lokalen Versorgung chronischer Wunden (Ulcus cruris, Dekubitus) in der Reinigungs- oder Granulationsphase. **Urgo Hydrogel** begünstigt die Selbstreinigung der Wunde, indem es die nekrotischen Hautstellen mit Feuchtigkeit versorgt und so das allmähliche Ablösen des abgestorbenen Gewebes erleichtert. Bei chronischen Wunden (Ulcus cruris, Dekubitus), die in der Granulationsphase nur schwach nassen oder austrocknen, bildet **Urgo Hydrogel** ein feuchtes Milieu, das den Heilungsprozess unterstützt. **Urgo Hydrogel** kann mit einem dünnen Hydrokolloidverband (z.B. **Algoplaque® Film**) oder einer Polyurethanfolie (z.B. **Optiskin film**) abgedeckt werden, damit das Gel in ständigem Kontakt mit der Wunde bleibt.

Zusammensetzung


- Guarummi, Propylenglykol, Wasser

Indikation

- Lokale Versorgung chronischer Wunden (Ulcus cruris, Dekubitus) in der Reinigungs- oder Granulationsphase

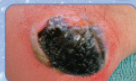

Trockene Nekrose

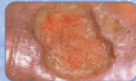

Fibrinbelagte Wunde

Anwendung

- Reinigen Sie die Wunde mit steriler, physiologischer Kochsalzlösung und trocknen Sie die Wundränder sorgfältig ab.
- Tragen Sie **Urgo Hydrogel** in dünner Schicht (4 bis 5 mm) **nur auf die trockene Nekrose** auf (nicht auf das gesunde Gewebe).



Abdeckung & Schutz

- Decken Sie die **Urgo Hydrogel**-Schicht mit einem dünnen Hydrokolloidverband (z.B. **Algoplaque® Film**) oder einer Polyurethanfolie (z.B. **Optiskin film**) ab.
- Der Wundverband sollte 2-3 cm auf gesunder Haut aufliegen.
- Urgo Hydrogel** kann bis zu 4 Tage auf der Wunde verbleiben.
- Entfernen Sie die aufgeweichten Beläge und wiederholen Sie die Anwendung.

