

Urgo® Lymph-Kit

... 3 maßgeschneiderte
Lösungen zur optimalen
Kompressionsbandagierung
von Ödemen

Urgo® Lymph-Kit	Arm groß
-----------------	----------

Urgo® Lymph-Kit	Bein
-----------------	------

Urgo® Lymph-Kit	Bein groß
-----------------	-----------

Urgo® Lymph-Kit

3 maßgeschneiderte Lösungen!

- Bedarfsgerecht zusammengestellt
- Direkt einsetzbar
- Mit nur einer PZN pro Set



Urgo® Lymph-Kit Arm groß

PZN 011 578 9 · Art.-Nr. 511002

- 20 Urgomull® fein 4 x 4 cm
- 2 Urgoband® 5 m x 6 cm
- 2 Urgoband® 5 m x 10 cm
- 3 Urgoband® 5 m x 12 cm
- 4 Urgo® Polsterbinde 3 m x 6 cm
- 4 Urgo® Polsterbinde 3 m x 10 cm
- 1 Urgotube Gr. 7F - 20 m x 10 cm
- 2 Urgosyval® 5 m x 2,5 cm

Urgo® Lymph-Kit Bein

PZN 011 591 5 · Art.-Nr. 511000

- 20 Urgomull® fein 4 x 4 cm
- 1 Urgoband® 5 m x 6 cm
- 1 Urgoband® 5 m x 8 cm
- 3 Urgoband® 5 m x 10 cm
- 4 Urgoband® 5 m x 12 cm
- 2 Urgo® Polsterbinde 3 m x 10 cm
- 1 Urgo® Polsterbinde 3 m x 15 cm
- 1 Urgotube Gr. 7F - 20 m x 10 cm
- 2 Urgosyval® 5 m x 2,5 cm

Urgo® Lymph-Kit Bein groß

PZN 011 595 0 · Art.-Nr. 511001

- 20 Urgomull® fein 4 x 4 cm
- 2 Urgoband® 5 m x 6 cm
- 2 Urgoband® 5 m x 8 cm
- 4 Urgoband® 5 m x 10 cm
- 6 Urgoband® 5 m x 12 cm
- 8 Urgo® Polsterbinde 3 m x 10 cm
- 8 Urgo® Polsterbinde 3 m x 15 cm
- 1 Urgotube Gr. 9G - 20 m x 12 cm
- 2 Urgosyval® 5 m x 2,5 cm

Indikation:

Lymphödeme oder Ödeme der oberen und/oder unteren Gliedmaßen.

Anwendungsempfehlung:

- Zum Schutz der Haut zuerst Urgotube anlegen.
- Urgomull fein kann zum Bandagieren verwendet werden (z.B. von Fingern und Zehen).
- Als Polstermaterial dient die Urgo Polsterbinde, diese wird über Urgotube angewandt.
- Anschließend wird die textilelastische Kurzzugbinde Urgoband über die Urgo Polsterbinde gewickelt.
- Zum Schluss werden die Enden der Urgoband Bandagen mit Urgosyval fixiert.

Vorsicht bei:

Immobilität, Entzündungen der Haut, nässenden Dermatosen, Unverträglichkeit auf das Material, Gefühlsstörungen der Gliedmaßen.

Offene Wunden müssen vor Anlegen der Binden mit entsprechenden Wundauflagen abgedeckt werden.